
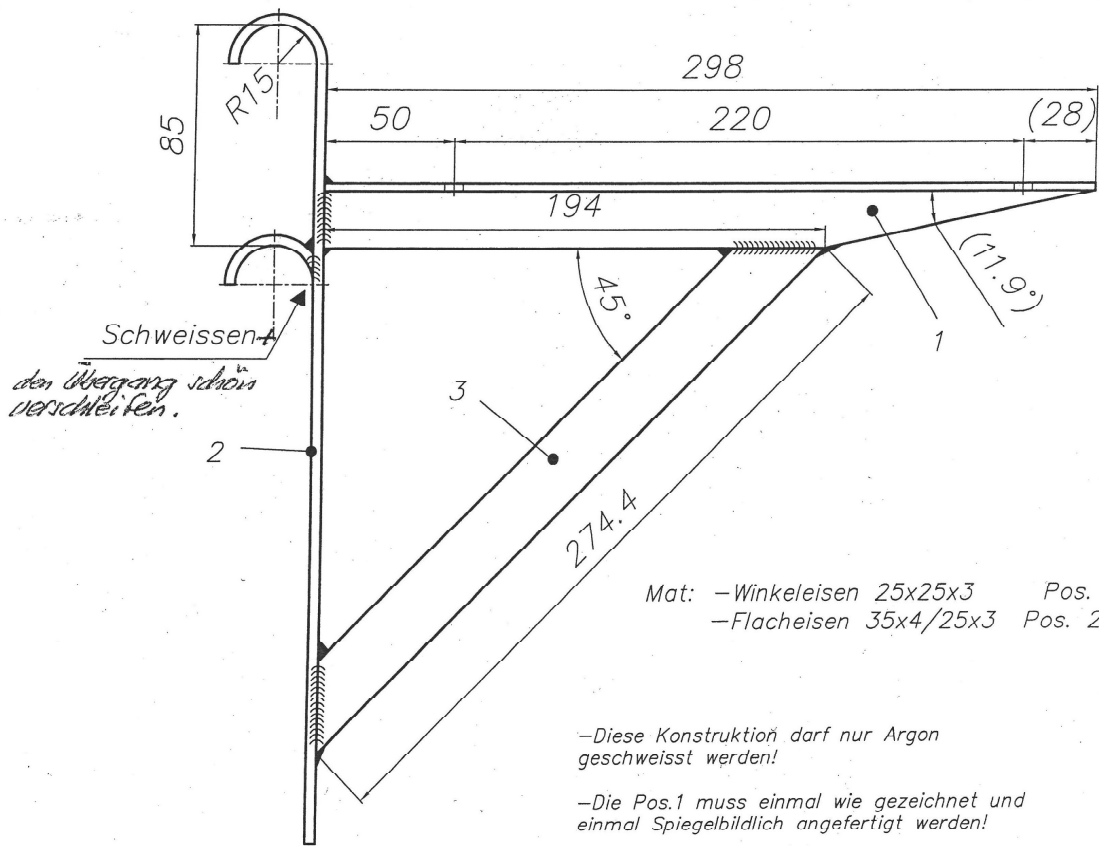


Tablar-Halterung für Hebetest "Sprossenwand"

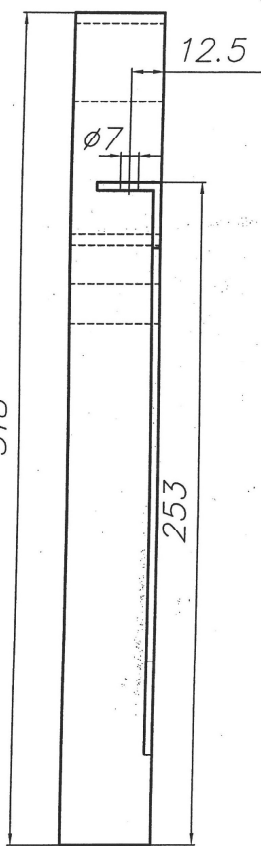


Schweißen
den Übergang schon
verschleifen.

- Mat: -Winkeleisen 25x25x3 Pos. 1
 -Flacheisen 35x4/25x3 Pos. 2 + Pos. 3

-Diese Konstruktion darf nur Argon geschweisst werden!
 -Die Pos.1 muss einmal wie gezeichnet und einmal Spiegelbildlich angefertigt werden!

318

Hebetest – Gestell "Sprossenwand"
2 x Tablare pro Anlage

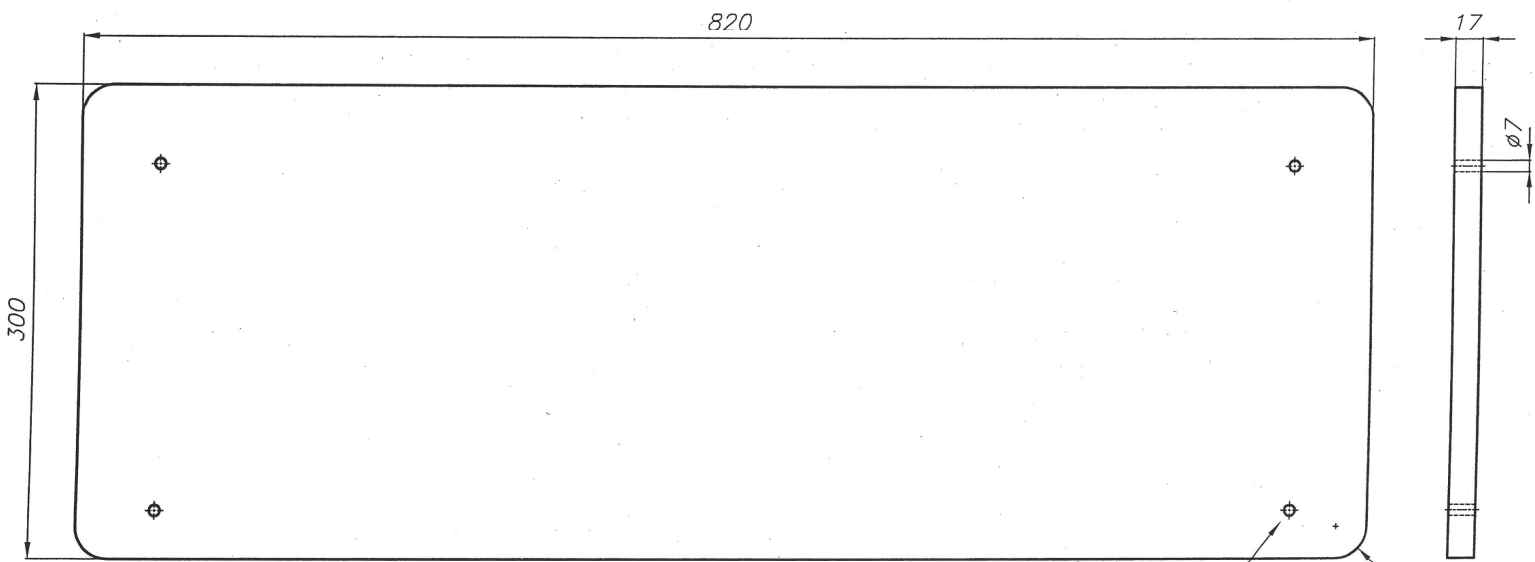

Löcher für Befestigung an Halterung anpassen

R20